

# BODY Secrets

## Microdermoabrasão Manual de instruções REF: AESB9469

Microdermoabrasão de diamante fornece um procedimento não cirúrgico de reestrutura da pele, usando cabeças de diamante estéreis para raspar ou esfregar a camada superior da pele e, em seguida, aspirar as partículas junto com qualquer sujeira e pele morta. Este procedimento remove detritos da pele, imperfeições, manchas, rugas e pigmentação indesejada na pele. O uso moderado, acompanhado de produtos para a pele que penetram através da camada superior da pele que atingem o nível da derme, ajuda a repor os nutrientes naturais, restaurar a atividade celular e promover a saúde da pele. Os resultados após um tratamento de microdermoabrasão com diamante são uma pele bonita, brilhante e saudável.

### Preparação:

Ter um plano de tratamento consoante o tipo de pele, utilizar luvas de vinil e máscara. Em pele oleosa ou acneica, usar um vaporizador antes do tratamento ou uma loção desengordurante. Limpar a pele com pads ou água e limpar com algodão.

### Instruções:

- 1- empurre o anel móvel do bocal de cobre na peça de mão e puxe a mangueira de vácuo tamanho 8x5, em seguida, empurre o anel de plástico preto na mangueira de vácuo
- 2- Coloque uma gota de creme ou loção no bocal da mangueira do aspirador, empurre o anel móvel e insira na mangueira do aspirador até o limite.
- 3- Insira um cotonete na cabeça de diamante e aperte a cabeça na peça de mão. Remova o cotonete após cada tratamento.
- 4- Ligue o interruptor de energia e ajuste a intensidade do vácuo.
- 5- Use a área de inclinação da peça de mão para entrar em contato com a superfície da pele. Prossiga com um movimento de deslizamento lento. Não coloque a peça de mão em um ponto por muito tempo, pois isso causará danos à pele.
- 6- Ajuste a vazão do cristal pelo regulador de vácuo lentamente do mínimo ao máximo. Para uso comum, não ajuste a vazão para o máximo, a menos que seja necessário. Isto é para uma melhor intensidade de conforto.
- 7- Estique suavemente a pele com o polegar e o indicador e deslize a peça de mão 2 a 3 vezes sobre a área a ser tratada e depois cruze novamente em direções diferentes para evitar estrias. Pinceladas ou movimentos de polimento podem ser usados em locais diferentes.
- 8- Após o tratamento escove toda a pele morta restante com uma escova macia e enxágue com esponjas húmidas ou toalha húmida e fria.
- 9- deixe a pele secar e aplique o produto de pele desejado.
- 10- Para limpar a cabeça de diamante, use escova de dentes ou cotonete humedecido com um pouco de álcool para limpar a impureza suja e depois use luz UV ou alta temperatura para esterilização.

### Avisos/Precauções

#### RESERVADO AOS PROFISSIONAIS

Não utilizar em clientes com problemas cardíacos ou clientes como pele danificada, inflamada ou infectada. Não utilize em pele sensível, com alergias, com cicatriz de cirurgia feita há menos de 12 meses, nos olhos ou genitais. Confirme antes de ligar o equipamento se o tubo de vidro ficou bem colocado. Clientes que tenham sardas na pele não podem usufruir deste tratamento.

### Especificações técnicas:

Voltagem 220-240V 50-60Hz  
Potência: 50w

Distribuído por:  
ACBB Nails - Import & Export, LDA  
Largo Elina Guimarães, N°6  
2675-345 Odivelas, Portugal  
telf: +351 215 880 283  
acbbnails@hotmail.com

# BODY Secrets

## Microdermoabrasão Manual de instruções REF: AESB9469

Microdermoabrasão de diamante fornece um procedimento não cirúrgico de reestrutura da pele, usando cabeças de diamante estéreis para raspar ou esfregar a camada superior da pele e, em seguida, aspirar as partículas junto com qualquer sujeira e pele morta. Este procedimento remove detritos da pele, imperfeições, manchas, rugas e pigmentação indesejada na pele. O uso moderado, acompanhado de produtos para a pele que penetram através da camada superior da pele que atingem o nível da derme, ajuda a repor os nutrientes naturais, restaurar a atividade celular e promover a saúde da pele. Os resultados após um tratamento de microdermoabrasão com diamante são uma pele bonita, brilhante e saudável.

### Preparação:

Ter um plano de tratamento consoante o tipo de pele, utilizar luvas de vinil e máscara. Em pele oleosa ou acneica, usar um vaporizador antes do tratamento ou uma loção desengordurante. Limpar a pele com pads ou água e limpar com algodão.

### Instruções:

- 1- empurre o anel móvel do bocal de cobre na peça de mão e puxe a mangueira de vácuo tamanho 8x5, em seguida, empurre o anel de plástico preto na mangueira de vácuo
- 2- Coloque uma gota de creme ou loção no bocal da mangueira do aspirador, empurre o anel móvel e insira na mangueira do aspirador até o limite.
- 3- Insira um cotonete na cabeça de diamante e aperte a cabeça na peça de mão. Remova o cotonete após cada tratamento.
- 4- Ligue o interruptor de energia e ajuste a intensidade do vácuo.
- 5- Use a área de inclinação da peça de mão para entrar em contato com a superfície da pele. Prossiga com um movimento de deslizamento lento. Não coloque a peça de mão em um ponto por muito tempo, pois isso causará danos à pele.
- 6- Ajuste a vazão do cristal pelo regulador de vácuo lentamente do mínimo ao máximo. Para uso comum, não ajuste a vazão para o máximo, a menos que seja necessário. Isto é para uma melhor intensidade de conforto.
- 7- Estique suavemente a pele com o polegar e o indicador e deslize a peça de mão 2 a 3 vezes sobre a área a ser tratada e depois cruze novamente em direções diferentes para evitar estrias. Pinceladas ou movimentos de polimento podem ser usados em locais diferentes.
- 8- Após o tratamento escove toda a pele morta restante com uma escova macia e enxágue com esponjas húmidas ou toalha húmida e fria.
- 9- deixe a pele secar e aplique o produto de pele desejado.
- 10- Para limpar a cabeça de diamante, use escova de dentes ou cotonete humedecido com um pouco de álcool para limpar a impureza suja e depois use luz UV ou alta temperatura para esterilização.

### Avisos/Precauções

#### RESERVADO AOS PROFISSIONAIS

Não utilizar em clientes com problemas cardíacos ou clientes como pele danificada, inflamada ou infectada. Não utilize em pele sensível, com alergias, com cicatriz de cirurgia feita há menos de 12 meses, nos olhos ou genitais. Confirme antes de ligar o equipamento se o tubo de vidro ficou bem colocado. Clientes que tenham sardas na pele não podem usufruir deste tratamento.

### Especificações técnicas:

Voltagem 220-240V 50-60Hz  
Potência: 50w

Distribuído por:  
ACBB Nails - Import & Export, LDA  
Largo Elina Guimarães, N°6  
2675-345 Odivelas, Portugal  
telf: +351 215 880 283  
acbbnails@hotmail.com